

ІНСТРУКЦІЯ З ДЕЗІНФЕКЦІЇ БІПОЛЯРНИХ ПІНЦЕТІВ

3 Підготовка

Важливо забезпечити, щоб під час підготовки ізольовані частини не торкалися твердих, гострих або важких предметів, оскільки це може пошкодити електричну ізоляцію та зробити виріб непридатним для використання.

Не дозволяється очищати кінчики антипригарних пінцетів (REF 607-xxx) металевими щітками, абразивами або іншими засобами, що пошкоджують поверхню. Для очищення області кінчиків слід використовувати, наприклад, вологий тампонний матеріал.

Цикли підготовки	75 разів
Замочування	Негайно після використання, не пізніше ніж через 2 години, замочуйте інструмент. Для цього використовуйте лише безальдегідні дезінфікуючі засоби (рекомендація: Gigasept Instru AF), придатні для дезінфекції інструментів (наприклад, з дозволом DGHM, FDA або знаком CE). Покладіть інструмент в ультразвукову ванну принаймні на 5 хвилин. Залишки від коагуляції (нагар) необхідно вимочити в очищувальному розчині та витерти вологою ганчіркою.
Очищення / дезінфекція	Рекомендація: машинне очищення в термодезінфекторі та термічна дезінфекція. Параметри: щонайменше 5 хвилин при 90 °C або при значенні A0 > 3000 BOWA рекомендує використовувати нейтральні або слабколужні (pH від 9,5 до 11,5) очищувальні або очищувально-дезінфекційні засоби, придатні для медичних виробів, виготовлених з пластика та металу. Залежно від концентрації дозволяється використання спиртових і (або) альдегідних компонентів. У разі необхідності продути фільтрованим стисненим повітрям. Для уникнення можливого пошкодження тиск повітря повинен бути менше 3 бар. Ручне очищення/дезінфекція непридатні для зазначених виробів.
Перевірений фахівцями BOWA ефективний спосіб очищення	Машинний спосіб (90 °C, 5 хвилин) з лужним очищувальним засобом з додаванням поверхнево-активної речовини: (Neodisher MediClean forte)
Автоклавування	Фракційний вакуумний спосіб Час витримки: 3-20 хвилин. Температура стерилізації: 134-137 °C

За використання інших очищувальних і дезінфекційних засобів виробник не несе відповідальності. Необхідно виконувати рекомендації виробника очищувального засобу.